

Gradal® RD

Le progressif d'intérieur



Gradal® RD est un verre progressif spécialement conçu pour les activités d'intérieur qui n'exigent pas de vision à l'infini, et où une distance de vision de 3 à 4 m est largement suffisante. Sa conception spécifique vise exclusivement à optimiser la vision intermédiaire et de près.

Avantages porteurs

- ▶ Bien être visuel accru pour toutes les activités d'intérieur (chez soi comme au bureau).
- ▶ De très larges zones de progression et un champ de vision de près étendu.
- ▶ Pleine liberté de mouvement autour de soi, avec une vision nette jusqu'à 4 mètres.
- ▶ Vision nette dans tout l'espace ambiant.
- ▶ Port de tête et position de corps naturel.
- ▶ Vision dynamique facilitée.




Retrouvez la légende des pictogrammes page 78.



Le traitement LotuTec® est l'indispensable complément de performance pour les verres Gradal RD® organiques.

Descriptif technique

- ▶ La correction en VL est augmentée de +0,50 dioptrie pour permettre une vision nette jusqu'à 4 mètres, la puissance VP reste inchangée.
- ▶ La zone de progression est de 25 mm offrant ainsi des champs de vision plus larges et une réduction considérable des déformations notamment en périphérie.
- ▶ La zone de VP est trois fois supérieure à celle d'un progressif standard.
- ▶ Il bénéficie des atouts de conception Zeiss :
 - symétrie horizontale,
 - décentrement variable.

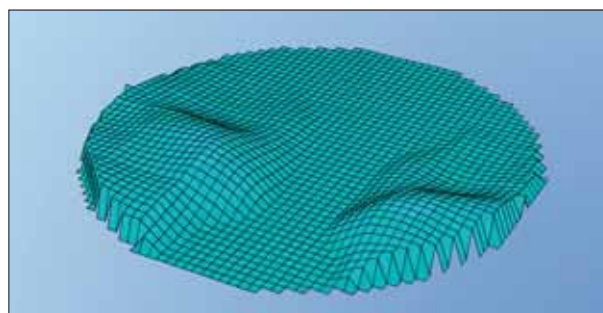

Répartition de l'astigmatisme perceptible sur un verre Gradal® RD.

Gradal® RD

5
add

RD

Adaptation

- ▶ À conseiller à tous les presbytes qui exercent des activités prolongées de près et de loin jusqu'à 4 mètres.
- ▶ Pour des applications professionnelles nécessitant à la fois une bonne vision en VI et VP en utilisation dynamique : dentiste, architecte, coiffeur, professeur, artisan, musicien, etc.
- ▶ Adaptation quasi immédiate.
- ▶ Verre non compatible avec la conduite automobile.



Contrôle

- ▶ À la commande indiquer la puissance prescrite VL et l'addition, (la sur-correction de +0,50d nécessaire pour l'espace ambiant est ajoutée automatiquement au moment du calcul du verre).
- ▶ La valeur de l'addition est donc inférieure de 0,50d à la commande pour élargir la VI. Par contre la puissance de VP reste inchangée.
- ▶ Valeurs de contrôle VL et VP indiquées sur la pochette.
- ▶ Sur-correction de la puissance vision de loin de +0,50d gravée dans le verre par un 5 dans le carré côté temporal.

Centrage

- ▶ Placer les croix de centrage centre pupille dans la position primaire du regard et dans une posture naturelle de la tête et du corps.
- ▶ Hauteur de montage minimale : 25 mm. Pour un très grand champ de VP, le cercle de mesure doit être entièrement conservé après meulage.
- ▶ Recommandations théoriques relatives à la monture de lunettes ajustée :
 - distance verre-œil entre 12 et 16 mm,
 - inclinaison de la monture de 8° à 12°.

Identification

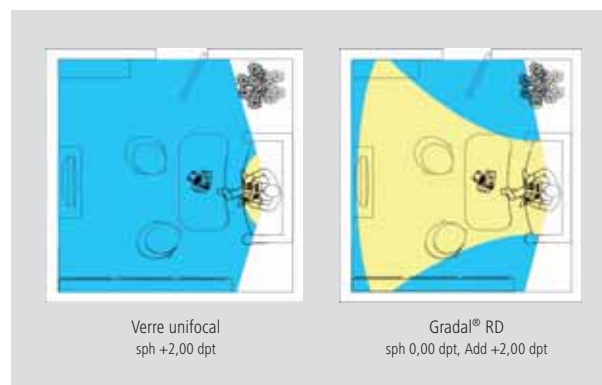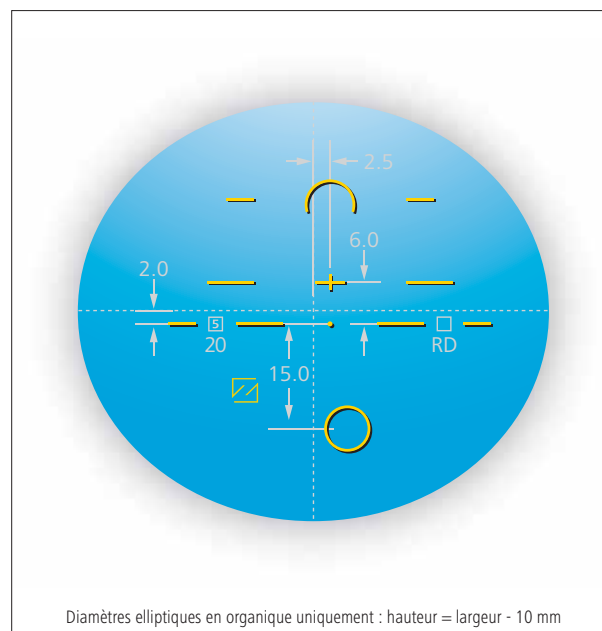

Informations techniques

Géométrie	Verre progressif d'intérieur, ne nécessitant pas une vision à l'infini.
Gamme produit	Organique 1.5 – Minéral 1.6.
Hauteur de montage	25 mm.
Traitements	Organique : Hart, LotuTec® ou Gold ET® – Minéral : Super ET® ou Gold ET®.
Fabrication	Surfaçage traditionnel.
Mesures complémentaires	Non. L'utilisation de RVT® est recommandée.
Puissances optimisées	Oui.