

Solutions de nettoyage des verres de lunettes ZEISS

Astuces pour un entretien respectueux des lunettes, garant de leur longévité.



Les traitements antireflets actuels, tels que [DuraVision® Platinum](#) de ZEISS, offrent de grands avantages grâce à leurs propriétés de résistance. L'entretien et le nettoyage appropriés des verres sont cependant très importants pour tout porteur de lunettes, aucun autre équipement optique n'étant exposé à de telles contraintes mécaniques et environnementales.

Pourquoi l'entretien des verres de lunettes est-il si important ?

- Les verres de lunettes de haute qualité représentent un investissement financier important, pour améliorer la vision mais également son mode de vie et sa propre sécurité.
- Un nettoyage de lunettes non adapté peut être à l'origine de rayures microscopiques, invisibles au début, sur les verres. Progressivement, le verre s'use et le potentiel des verres, malgré leur qualité, diminue. La vision finit par être gênée.
- Les rayures ne peuvent être retirées sur les verres organiques ou minéraux modernes. Les verres doivent alors être remplacés.

les verres de lunettes

- Passez les verres de lunettes sous l'eau légèrement tiède. Avec le traitement particulièrement performant Clean Coating les gouttes d'eau glissent ou s'essuient aisément à l'aide d'un chiffon en microfibre pour lunettes.
- Quant aux salissures les plus tenaces, un spray de solution de nettoyage pour lunettes peut faciliter le nettoyage minutieux lorsqu'il est utilisé avec un chiffon en microfibre pour lunettes.
- Lorsque vous êtes de sortie, le nettoyage à l'aide d'un chiffon microfibre convient mais il est préférable d'employer des lingettes nettoyantes pré-humidifiées ZEISS qui ne rayent pas le verre.
- Tous les six mois environ, il est recommandé de faire nettoyer ses lunettes dans un bain d'ultrasons chez son opticien, ce qui permet également d'entretenir les montures de lunettes en douceur.

- Passez les verres de lunettes sous l'eau légèrement tiède. Avec un verre haute performance Ne pas nettoyer les verres de lunettes avec des chiffons standard, des serviettes ou du papier.
- Ne pas utiliser de détergents ménagers ou de détergents pour verre du commerce pour le nettoyage des lunettes.
- Ne pas poser les lunettes sur les verres mais sur la monture. Toujours ranger les lunettes dans un étui prévu à cet effet et les envelopper dans un chiffon microfibre pour éviter de les endommager si l'étui est secoué.
- Ne pas exposer les lunettes à des températures de plus de 80 °C (dans un sauna ou sur le tableau de bord à la lumière du soleil, par ex.).
- Utiliser vos deux mains pour mettre et enlever vos lunettes afin d'éviter d'endommager les montures des lunettes, et donc le centrage.

Vue d'ensemble des produits de nettoyage pour lunettes de ZEISS



Lingettes nettoyantes ZEISS

Les lingettes pré-humidifiées en tissu microfibre de ZEISS garantissent un nettoyage efficace et rapide lorsqu'on est de sortie. Une batterie de [tests](#) réalisée par des laboratoires indépendants (COLTS) montrent que leurs performances de nettoyage sont meilleures que d'autres produits, qu'elles ne rayent pas et ne laissent pas de traces sur le verre. La structure exceptionnellement fine des lingettes garantit un nettoyage tout en douceur de tous les types de verres, même ceux bénéficiant de traitements de haute qualité. Les lingettes sont pré-humidifiées au moyen de deux agents actifs combinés utilisés en outre pour le nettoyage des équipements médicaux. Ces agents doux ne contiennent aucune substance de nettoyage agressive ni de parfum artificiel. Et surtout, les lingettes nettoyantes ZEISS peuvent également convenir au nettoyage de tout type de surface optique sensible en toute simplicité (écrans LCD, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléphones mobiles, etc.), sans laisser de traces.



Spray nettoyant pour verres de ZEISS (240 ml)

Le spray nettoyant pour verres de ZEISS

[permet de nettoyer efficacement et en douceur](#) les verres de lunettes. Pour nettoyer le verre, il suffit de vaporiser le liquide sur le chiffon en microfibre et de nettoyer les deux côtés du verre. Il suffit de procéder de la même manière pour le nettoyage des surfaces optiques. Le spray ne contient aucune substance de nettoyage susceptible d'endommager le verre, le traitement ou la surface optique.




Chiffon en microfibre pour verres ZEISS

Le produit classique de nettoyage pour verres de qualité ZEISS : le chiffon en microfibre ZEISS, pour un entretien des lunettes efficace et en douceur. Utilisé avec le spray nettoyant ZEISS, à sec ou après avoir passé les lunettes sous l'eau légèrement tiède, le chiffon en microfibre de ZEISS est le meilleur pour préserver les performances de tous les verres de lunettes durant toute la durée de leur vie.



Tests de produits

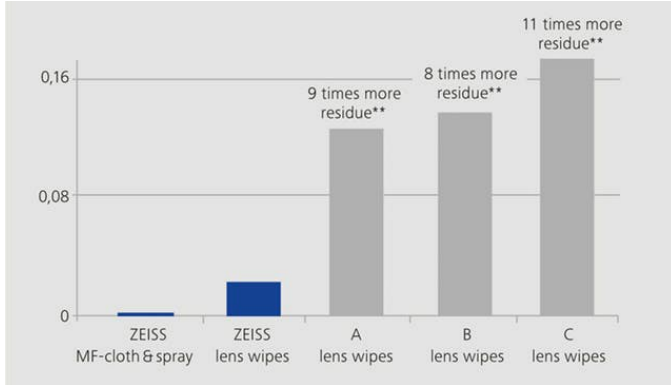

* Test de longue durée réalisé par l'institution optique reconnue mondialement COLTS. ** En comparaison avec les chiffons nettoyants pour verres de ZEISS.

Les tests réalisés par COLTS, laboratoire majeur de tests qualité à l'échelle internationale dans le secteur de l'optique, ont montré que ses performances de nettoyage sont les plus efficaces par rapport à celles de dix autres chiffons pour verres de lunettes ; il nettoie en douceur, sans rayer.


Plus doux : la surface et le traitement des verres prescrits sont préservés, et ce, même lors d'un test de longue durée.

Plus efficace : aucun autre nettoyant pour verres n'est aussi efficace.

Téléchargez le manuel d'utilisation des produits de nettoyage ZEISS ici.



Produits afférents

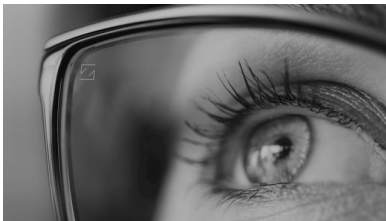

Les verres de lunettes ZEISS

Portefeuille de produits

[En savoir plus](#)



Traitements de ZEISS

[En savoir plus](#)



Verres de protection solaire ZEISS

Pour profiter pleinement du soleil.

[En savoir plus](#)

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des services innovants, pour améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

Contactez-nous pour commencer

Service à la clientèle ZEISS

[+33 820 01 35 35](#)

[Adresse électronique](#)





Explorer

Comprendre la vision
Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin
Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

Services

Mon Profil Visuel
Dépistage des troubles visuels en ligne
Accéder à votre e.certificat

Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies
Verres de lunettes ZEISS
Solutions de nettoyage ZEISS
PartnerNet
VisuStore